



ADHÉSIF AVEC INDICATEUR DE CYCLE DE STÉRILISATION PAR VAPEUR

En papier crêpe saturé (beige)
COR31002550VE



DESCRIPTION

Le ruban indicateur de cycle de stérilisation, **fabriqué en papier crêpe saturé**, est conçu pour maintenir l'intégrité des paquets soumis à la stérilisation par vapeur. Utilisé avec des emballages jetables, il permet d'**identifier les objets** ayant subi, ou non, un cycle d'autoclavage. Pour assurer son **adhérence** et son **efficacité** tout au long du processus, le ruban doit être appliqué en **exerçant une pression**.

- ✓ **Indicateur vert tournant au noir** lors du processus de stérilisation
- ✓ **Utilisation :**
 - **Autoclave à écoulement de vapeur par gravité** : à **121°C (+3°C)** durant **30 minutes**
 - **Autoclave vapeur à vide partiel** : à **132°C (+3°C)** durant **4 minutes** ou à **135°C (+3°C)** durant **3 minutes**
- ✓ **Sans latex**
- ✓ S'enlève facilement après utilisation
- ✓ **Conforme aux normes internationales ISO 11140-1:2014**
- ✓ Reconnu comme **dispositif médical selon FDA**
- ✓ **Péremption : 36 mois** à compter de la date de fabrication

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE

Couleur	Naturel avec bandes indicatrices vertes
Endos	Papier crêpe saturé
Adhésif	Sans solvant à base d'élastomère synthétique thermoplastique
Bandes Indicatrices	Encre sans-plomb
Epaisseur	5,5 mil (0,14 mm)
Adhérence à l'acier	70 oz/po (19N/25 mm)
Résistance à la traction	20 lb/po (87N/25mm)
Elongation	7%

CONDITIONNEMENT

Références	Largeur ruban	Conditionnement
COR31002550VE	24 mm	Carton de 36 rouleaux

Version 1.0_09/25

STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com