



GAINE POUR STÉRILISATION AUTOCLAVE

TYVEK / PELABLES /
FERMETURE PAR SOUDURE
COM44TYSR-xx

DESCRIPTION

Les gaines de la gamme RULOPEEL ont été conçus pour répondre aux exigences strictes des processus de stérilisation par passage en autoclave.

- ✓ Composition : face Tyvek™ 1073B nettoyé + film PET / PP 62µm
- ✓ Fermeture par soudure
- ✓ Contenu visible grâce au côté transparent
- ✓ Fabrication et conditionnement en ISO 7 (ISO 14644 :2015)
- ✓ Génération très faible de particules à l'ouverture
- ✓ Haute résistance à la perforation et à l'éclatement
- ✓ Indicateur de stérilisation imprimé

Chevron de pelabilité pour une
ouverture propre et facile

Excellente barrière microbienne


Conformité EN 868-5



- **Température de scellage recommandée** : 160-190°C / 2 à 3 secondes (Soudeuse par impulsion)
- **Température de scellage recommandée** : 130 -140° C (Soudeuse à défilement)
- **Température / temps de stérilisation (vapeur) recommandés** : 121°C – 123°C / 30 min

PÉREMPTION & CONDITIONS DE STOCKAGE

Péremption : 3 ans à date de fabrication

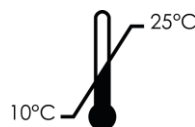

- ✓ Stocker à des températures comprises entre 10°C et 25°C
- ✓ Stocker dans un endroit sec
- ✓ Protéger des sources de chaleur ou radioactives

Version 3.0_03/26

CLEANVIEW, la marque propre de



Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1) 1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe





GAINE POUR STERILISATION AUTOCLAVE

 TYVEK / PELABLES /
 FERMETURE PAR SOUDURE
 COM44TYSR-xx

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYVEK 1073B Uncoated

PROPRIETES	SPECIFICATIONS	UNITES	METHODE
Poids basique	74,6	g/m ²	DIN EN ISO 536
Résistance à la traction MD	196	N / INCH	DIN EN ISO 1924-2
Résistance à la traction CD	200	N / INCH	DIN EN ISO 1924-2
Résistance à la déchirure MD	3,3	N	DIN EN ISO 21974
Résistance à la déchirure CD	3,5	N	DIN EN ISO 21974
Résistance à l'éclatement	1213	Kpa	ISO 2758
Perméabilité à l'air (Bendsten)	572	ml/min	ISO 5636-3
Elongation MD	20	%	ISO 1924
Elongation CD	24	%	ISO 1924
Perméabilité vapeur d'eau	1615	g/m ² /24h	TAPPI T523
Barrière Microbienne	5,2	LRV	ASTM F1608

FILM PET / PP

PROPRIETES	SPECIFICATIONS	UNITES	METHODE
Epaisseur	51-71	µm	Micromètre
Statique C.O.F MD	0,15 - 0,45	X	ASTM D -1984-01
Statique C.O.F CD	0,15 - 0,45	X	
Cinétique C.O.F MD	0,15 - 0,45	X	
Cinétique C.O.F CD	0,15 - 0,45	X	
Résistance à la traction MD	> 400	Kgf/cm ²	ASTM D -882-02
Résistance à la traction CD	> 400	Kgf/cm ²	
Elongation MD	> 50%	%	
Elongation CD	> 50%	%	

Version 3.0_03/26

 CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1) 1 34 44 23 23
 Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
 Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

 Une société du groupe
 **SYNEXIN**



GAINE POUR STERILISATION AUTOCLAVE

TYVEK / PELABLES /
FERMETURE PAR SOUDURE
COM44TYSR-xx


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT FINI

PROPRIETES	SPECIFICATIONS	METHODE
Résistance soudure	Min 1,5 N / 15 mm	EN 868-5 Annexe D
Intégrité soudure	Ne doit pas fuir	ASTM - F1929
Caractéristique de pelabilité	Pelabilité 'propre'	EN 868-5 Annexe E
Température de stérilisation	121°/30 min	EN 868-5 Annexe B
Génération particulaire > 10µm	Max 250 pcs / ml (360 cm ² / 250 ml d'eau déionisée)	SR STANDARD
Génération particulaire > 25 µm	Max 80 pcs / ml (360 cm ² / 250 ml d'eau déionisée)	SR STANDARD
Indicateur de stérilisation	ISO11140-1 Class 1	Changement de couleur après stérilisation
Dimensions et tolérance	Selon Plan	SR STANDARD

DIMENSIONNEMENT TYPE

COM44TYSR-40

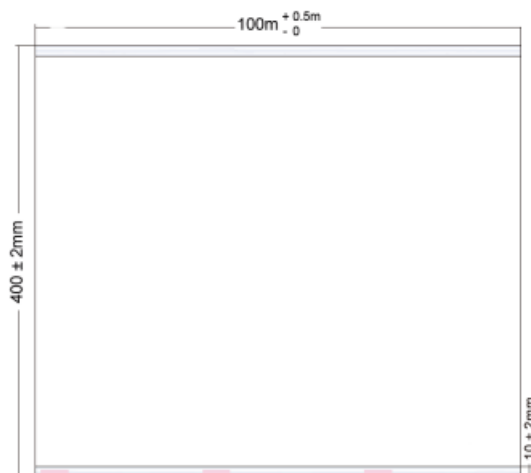

Version 3.0_03/26

CLEANVIEW, la marque propre de



Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe





GAINE POUR STERILISATION AUTOCLAVE

TYVEK / PELABLES /
FERMETURE PAR SOUDURE
COM44TYSR-xx

CONDITIONNEMENT

Références	Dimensions	Conditionnement
COM44TYSR-15	150 mm x 100 m linéaire	Carton de 4 gaines de longueur 100m en double emballage PE + film protection aluminium
COM44TYSR-20	200 mm x 100 m linéaire	Carton de 4 gaines de longueur 100m en double emballage PE + film protection aluminium
COM44TYSR-30	300 mm x 100 m linéaire	Carton de 4 gaines de longueur 100m en double emballage PE + film protection aluminium
COM44TYSR-40	400 mm x 100 m linéaire	Carton de 2 gaines de longueur 100m en double emballage PE + film protection aluminium
COM44TYSR-50	510 mm x 100 m linéaire	Carton de 2 gaines de longueur 100m en double emballage PE + film protection aluminium

Exemple de conditionnement aluminisé :



Version 3.0_03/26

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1) 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe
 **SYNEXIN**