



PHAGO

PHAGO'SPRAY DM



Nettoyant et désinfectant pour les surfaces hautes, dans les environnements à risques

CONTACT ALIMENTAIRE



- Large spectre d'activité
- Position mousse ou pulvérisation
- Ne laisse pas de trace au séchage

INDICATION

PHAGO'SPRAY DM est un nettoyant désinfectant professionnel pour la désinfection des surfaces dans les environnements à risques. Il peut être utilisé en pulvérisation sur les murs, les plafonds et le mobilier des services de soins et de chirurgie. Le PHAGO'SPRAY DM peut aussi être utilisé en application sur un linge à usage unique pour la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du malade.

COMPOSITION

Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS n°7173-51-5; 0,14% m/m) N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (CAS n°2372-82-9; 0,25% m/m) Éthanol (CAS n°64-17-5; 24,00% m/m) Autre composant : Parfum

CARACTÉRISTIQUES

Couleur : incolore Parfum
pH (du produit pur) à 20° C : 9,5 à 11,0 Densité à 20° C : 0,968 ± 0,005

MODE D'EMPLOI

Le PHAGO'SPRAY DM est prêt à l'emploi.
Pulvérisez sur un linge à usage unique et/ou appliquez sur la surface à désinfecter. Ne pas rincer*
Laissez agir 5 minutes pour une activité bactéricide ou 15 minutes pour un spectre complet.

* Dans le cas de désinfection de surfaces pouvant entrer en contact direct avec les denrées alimentaires, un rinçage à l'eau potable est nécessaire (arrêté du 8 septembre 1999 et ses modifications).

DISTRIBUTION PAR



STERIGENE
INGÉNIERIE DES PROCÉDÉS PROPRES & STÉRILES

ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE

TEMPS D'ACTION

<u>Bactéricide</u>	EN 13727 EN 13697 dont <i>S. typhimurium</i> EN 16615	15 min* 5 min 5 min
<u>Fongicide</u>	EN 13697 <i>C. albicans</i> EN 13624 <i>C. albicans</i> EN 16615 <i>C. albicans</i>	15 min 5 min 15 min
<u>Mycobactéricide</u>	EN 14348 <i>M. avium</i>	15 min
<u>Activité virucide</u>	EN 14476 <i>Vaccinia virus</i> EN 16777 <i>Vaccinia virus</i> EN 14476 <i>Rotavirus</i>	15 min 15 min 5 min*

*En conditions de propreté

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Attention. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des flammes nues, des étincelles. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlevez les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

RÉFÉRENCES ET CONSERVATION

Durée de conservation : 36 mois

Durée de conservation après ouverture : jusqu'à péremption

SA0143180
SA0143170

6x750mL
2x5L



CHRISTEYNS