



PHAGO

PHAGO'SPORE

DISTRIBUTION PAR



STERIGENE
INGÉNIERIE DES PROCÉDÉS PROPRES & STÉRILES



Nettoyant désinfectant sporicide pour les sols et les surfaces hautes, et les surfaces des dispositifs médicaux non invasifs

CONTACT ALIMENTAIRE



- Spectre d'activité complet
- Actif sur *Clostridium difficile* selon EN 17846
- Spray moussant à action rapide

INDICATION

PHAGO'SPORE est un détergent désinfectant pour toutes surfaces, incluant les surfaces des dispositifs médicaux non invasifs.

PHAGO'SPORE est formulé à partir d'une substance active (acide peracétique) garantissant une efficacité microbiologique à large spectre tout en assurant un respect de l'environnement par sa biodégradabilité en acide acétique, oxygène et eau.

Sa tête de pulvérisateur mousse dense permettant d'éviter la formation d'aérosol et de protéger l'utilisateur.

COMPOSITION

Acide peracétique (CAS N° 79-21-0 ; 0,034% m/m).

Peroxyde d'hydrogène (CAS N° 7722-84-1 ; 3,26% m/m).

Parfum.

TP2 – Désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

TP4 – Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur : incolore

pH pur à 20°C : 2,1 – 2,3

Densité à 20°C : 1,005 – 1,020

MODE D'EMPLOI

PHAGO'SPORE est prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Il peut être utilisé pour la désinfection des sols en suivant le protocole des bandeaux d'imprégnation (1L pour 5 bandeaux).

Pulvérisez sur un linge à usage unique et/ou appliquez sur la surface à désinfecter. Ne pas rincer*. Laissez agir 5 minutes pour une activité bactéricide ou 15 minutes pour un spectre complet. *Dans le cas de désinfection de surfaces pouvant entrer en contact direct avec les denrées alimentaires, un rinçage à l'eau potable est nécessaire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux. Produit réservé à un usage professionnel. Port des gants conseillé. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande. Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE

TEMPS
D'ACTION

<u>Bactéricide</u>	EN 13727 EN 13727+A2 SARM, <i>K.pneumonia</i> <i>ESBL</i> , <i>K.pneumonia</i> OXA 48, <i>A.baumannii</i> EN 13697 EN 16615	5 min 5 min 5 min 1 min
<u>Fongicide</u>	EN 1650+A1 <i>A. brasiliensis</i> EN 13624 EN 13697 EN 16615 <i>C. albicans</i> et <i>A. brasiliensis</i>	15 min 5 min 15 min 5 min
<u>Mycobactéricide</u>	EN 14348	5 min
<u>Virucide</u>	EN 14476+A2 <i>Poliovirus</i> EN 14476+A2 <i>Adenovirus</i> , <i>Norovirus</i> EN 16777 <i>Adenovirus</i> , <i>Norovirus</i>	15 min 5 min 5 min
<u>Sporicide</u>	EN 13697 <i>C. difficile</i> , <i>sporulée</i> EN 13704 <i>B. subtilis</i> EN 13704 <i>C. difficile</i> , <i>C. sporogenes</i> EN 17126 <i>C. difficile</i> O27, <i>B. cereus</i> EN 17126 <i>B. subtilis</i> EN 17846 <i>C. difficile</i>	15 min 15 min 5 min 15 min 5 min 5 min

RÉFÉRENCES ET CONSERVATION

Durée de conservation : 18 mois

Durée de conservation après ouverture : jusqu'à péremption

SA0143780
65007

6 x 750mL
2x5L



CHRISTEYNS