



PHAGO

PHAGO'SOFT



Nettoyant désinfectant surfaces



- Large spectre antimicrobien
- Respecte l'environnement (Ecocert)
- Excellente compatibilité avec les matériaux

INDICATION

PHAGO'SOFT est un détergent désinfectant pour toutes surfaces hautes, toutes surfaces vitrées et tous écrans. Il est aussi compatible avec l'inox. Agréé contact alimentaire, sa substance active (acide peracétique) garantit une efficacité microbiologique à spectre large tout en minimisant son impact environnemental par sa dégradation en acide acétique, oxygène et eau.

COMPOSITION

Acide peracétique (CAS N°79-21-0) : 0,01% m/m.
 Peroxyde d'hydrogène (CAS N°7722-84-1) : 2,9% m/m.
 Composition : <5% agents de surfaces non ioniques, agents de surfaces anioniques, désinfectants, parfums.
 Contient aussi : Eau, solvants, correcteur d'acidité, stabilisant, bases. 99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.

TP2 – Désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.
 TP4 – Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT «Ecodétergent» disponible sur <http://detergents.ecocert.com>.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur : incolore
 pH pur à 20°C : 3,0 – 3,7
 Densité à 20°C : 1,000 – 1,020

MODE D'EMPLOI

PHAGO'SOFT est prêt à l'emploi, ne pas diluer. Utilisez des gants et un vêtement de protection approprié. Il ne doit pas être rincé, sauf en cas de désinfection des surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les denrées alimentaires où le PHAGO'SOFT doit être rincé à l'eau potable. (Conformément à l'arrêté du 8 septembre 1999 et ses modifications).

Pulvérisez sur un linge à usage unique et/ou appliquez sur la surface à désinfecter. Evitez de faire ruisseler le produit. Laissez agir 5 minutes pour une activité bactéricide ou 15 minutes pour un spectre complet.

ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE

TEMPS D'ACTION

<u>Bactéricide</u>	EN 1276 EN 13727 + A2 dont MRSA, A. baumannii, K. pneumoniae ESBL et OXA 48	5 min 5 min
	EN 13697 EN 16615	5 min 5 min
<u>Fongicide</u>	EN 1650 EN 13624 EN 13697 C.albicans EN 16615	15 min 15 min 15 min 15 min
<u>Mycobactéricide</u>	EN 14348 M. terrae	15 min
<u>Virucide contre les virus enveloppés</u>	EN 14476 Vaccinia virus EN 16777 Vaccinia virus	5 min 5 min
<u>Activité virucide</u>	EN 14476 Rotavirus*	5 min

*Test réalisé en condition de propreté

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux. Produit réservé à un usage professionnel. Port des gants conseillé.

La fiche de données de sécurité est disponible demande.
 Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

RÉFÉRENCES ET CONSERVATION

Durée de conservation : 18 mois

Durée de conservation après ouverture : jusqu'à péremption

65004
65006

6 x 750mL
2 x 5L



CHRISTEYNS